

ジェリービーンズスイッチ の使い方



ATライブラリー

手順

3.5mmのモノプラグをおもちゃやコントロール機器に差し込んでください。



手順

3.5mmのモノプラグをおもちゃやコントロール機器に差し込んでください。



「スイッチ対応学習型 赤外線リモコン」の使い方



ATライブラリー

リモコン信号を4つ記録でき、それぞれを外部スイッチで送信できます。

使い方は
本体フタ裏面に書いてあります



使いやすいスイッチを接続し、
操作することも可能です



通常利用時

スイッチを押したときに、ボタンに記録されたリモコン信号が送出される。



• DIPスイッチは1:OFF、2:OFF

ON—OFFモード

スイッチを押したときと離れたときに、ボタンに記録されたリモコン信号が送出される。



• DIPスイッチは1:OFF、2:ON

リモコンコンセントモード

スイッチを押すとリモコンコンセントがON、もう一度押すとOFF



• DIPスイッチは1:ON、2:OFF

リモコンコンセントモード+

ON-OFFモード

スイッチを押している間、リモコンコンセントがON(離すとOFF)になる。



• DIPスイッチは1:ON、2:ON

ピンタッチスイッチ



ATライブラリー

・ピンタッチセンサー先端部に触れることにより、体にたまった静電気を感知してスイッチ出力します。

・医療用テープや絆創膏などで、本人の意思で動く部位に貼り付けてスイッチとして使うことができます。